

Adapterstecker für BIOM[®] 4c/SDI[®] 3c (Artikelnr. 54406)

Hinweise zur Benutzung eines BIOM[®] 4c, BIOM[®] 5c, BIOM[®] 5cl an einem SDI[®] 3c, mithilfe des Adaptersteckers, Art. Nr. 54406.

Ergänzende Hinweise zu den Bedienungsanleitungen zu SDI[®] 3/SDI[®] 4 und BIOM[®] 3/BIOM[®] 4/BIOM[®] 5.



Hinweis

Beachten Sie die Bedienungsanleitungen und machen Sie sich vor Benutzung der Geräte mit der sicheren Handhabung vertraut.

Zweck des Adaptersteckers ist die Verbindung eines BIOM[®] 4c/BIOM[®] 5c/ BIOM[®] 5cl mit einem bereits vorhandenen SDI[®] 3c. Dazu muss der 4-polige Stecker des Antriebsmoduls am BIOM[®] 4c/BIOM[®] 5c/ BIOM[®] 5cl auf die 2-polige Kupplung des SDI[®] 3c Gehäuses angepasst werden.



Stecken Sie die 2-polige Seite des Steckers in die Kupplung des SDI[®] 3c Gehäuses.




Am anderen Ende des Adaptersteckers kann der 4-polige, sterile Verbindungsstecker eingesteckt werden.

Beachten Sie, dass sich der Verbindungsstecker in nicht sterilem Zustand befindet und auch nicht zur Sterilisation geeignet ist.

Achten Sie beim Einstecken darauf, dass jeweils die gegenüberliegenden roten Markierungen in einer Linie liegen



Die blau eloxierte Hülse des Adaptersteckers zeigt in Richtung des einzusteckenden, ebenfalls blau gefärbten Knickschutzes am Verbindungskabel zum BIOM[®] 4c/BIOM[®] 5c/ BIOM[®] 5cl. Die blaue Farbe des Knickschutzes an den 4-poligen BIOM[®] 4c/BIOM[®] 5c/BIOM[®] 5cl Antriebsmodulen erinnert zusätzlich daran, dass der blau eloxierte Adapterstecker benötigt wird.

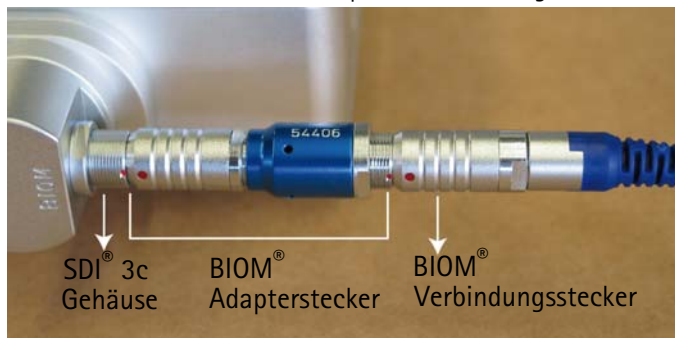



Vorsicht

Beachten Sie, dass der Adapterstecker für das BIOM® unsteril ist, während das sterilisierte Verbindungskabel zum BIOM® 4c/BIOM® 5c/BIOM® 5cl eingesteckt wird.

Vermeiden Sie bitte jeglichen Kontakt mit unsterilen Teilen des SDI® oder des Mikroskopsystems.

Der Adapterstecker kann solange am SDI® montiert bleiben, wie mit einem BIOM® 4c/BIOM® 5c/BIOM® 5cl gearbeitet werden soll. Bevor mit einem BIOM® 3c weiter gearbeitet werden kann, muss der Steckeradapter vom SDI® Gehäuse entfernt werden. Dazu greifen Sie bitte den Adapter an der silberfarbigen, geriffelten Hülse. Durch Ziehen an der Hülse wird der Verschlussmechanismus entriegelt und der Steckeradapter lässt sich entfernen.



Ziehen Sie die 2-polige Seite des Steckers aus der Kupplung des SDI® Gehäuses.



Vorsicht

Der Adapterstecker für BIOM® 4c/BIOM® 5c/BIOM® 5cl/SDI® 4c kann nicht sterilisiert werden.

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
35582 Wetzlar
GERMANY
Tel.: 0641 / 2005-0
Fax: 0641 / 2005-299
E-mail: sales@oculus.de
www.oculus.de